




Manual de Instruções

Guia detalhado para uso da
Inteligência Artificial - avva

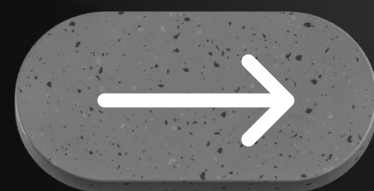



Seja bem-vindo(a) ao nosso manual!

Neste manual, orientaremos você em cada etapa do processo, desde a captura correta de fotos até o uso adequado das vestimentas, para garantir os melhores resultados em seus clientes.

Siga estas regras para obter a melhor precisão.


O que seu cliente deve vestir?

Uma blusa justa




Sem cinto e acessórios

Leggings justas ou calças ajustadas

Sapatos sem salto ou descalço

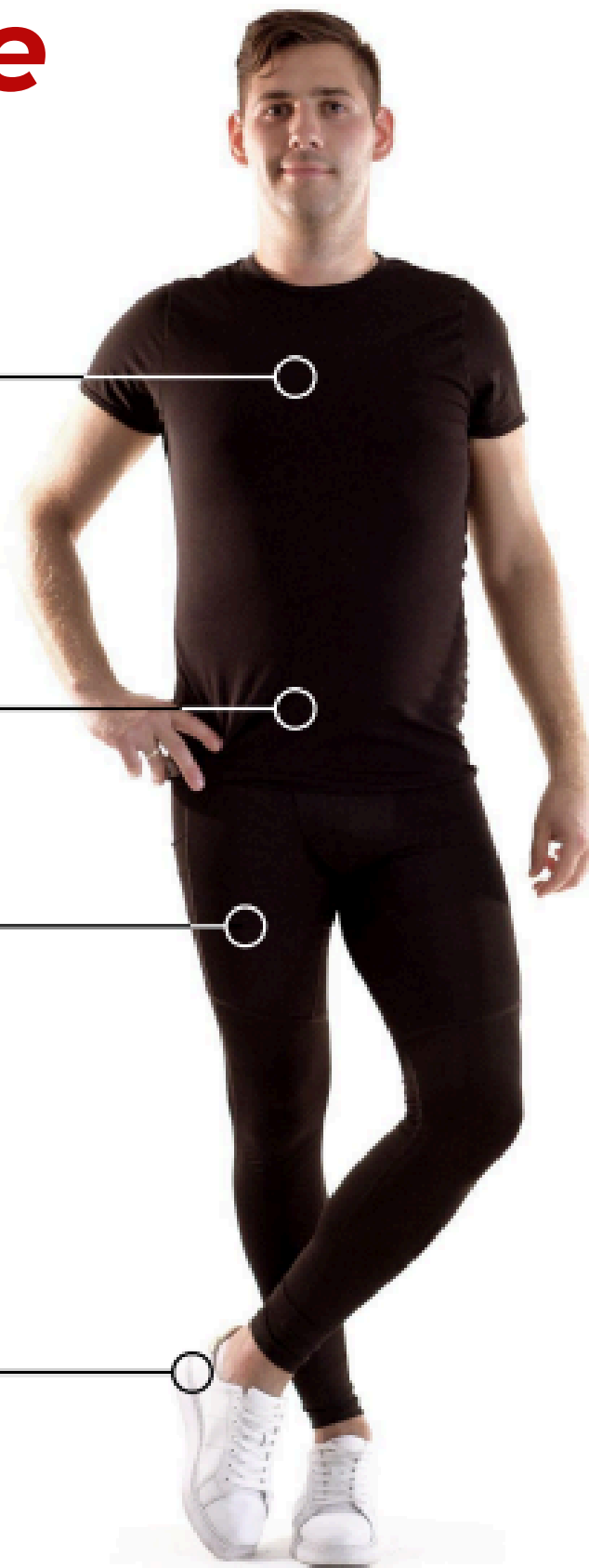


O que seu cliente deve vestir?

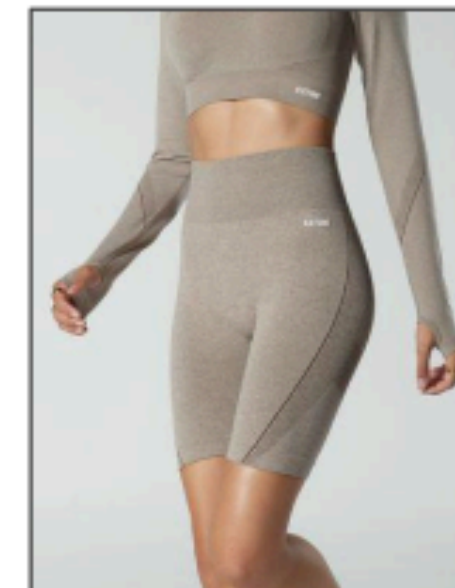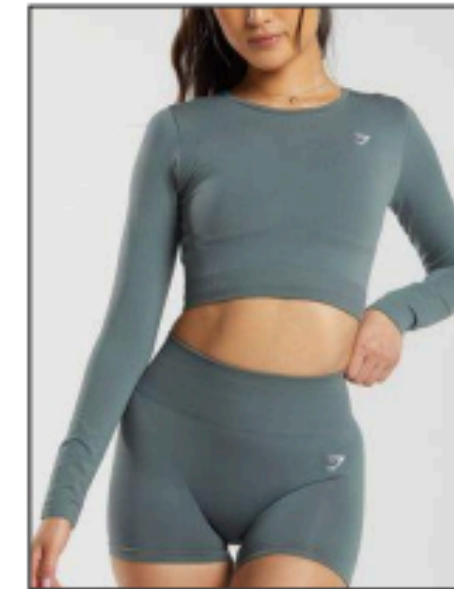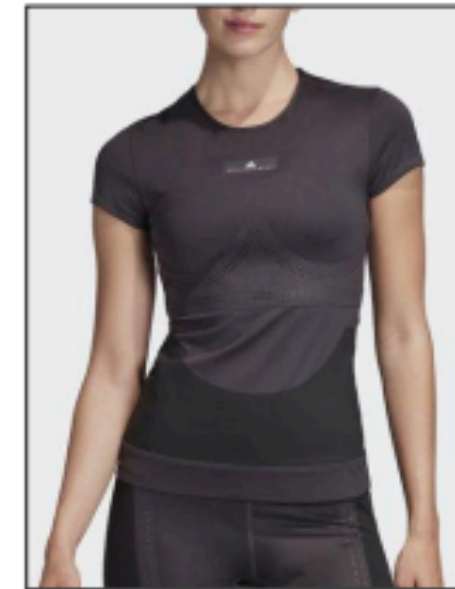


Tirando as fotos

Tire a foto em um ângulo de 90°

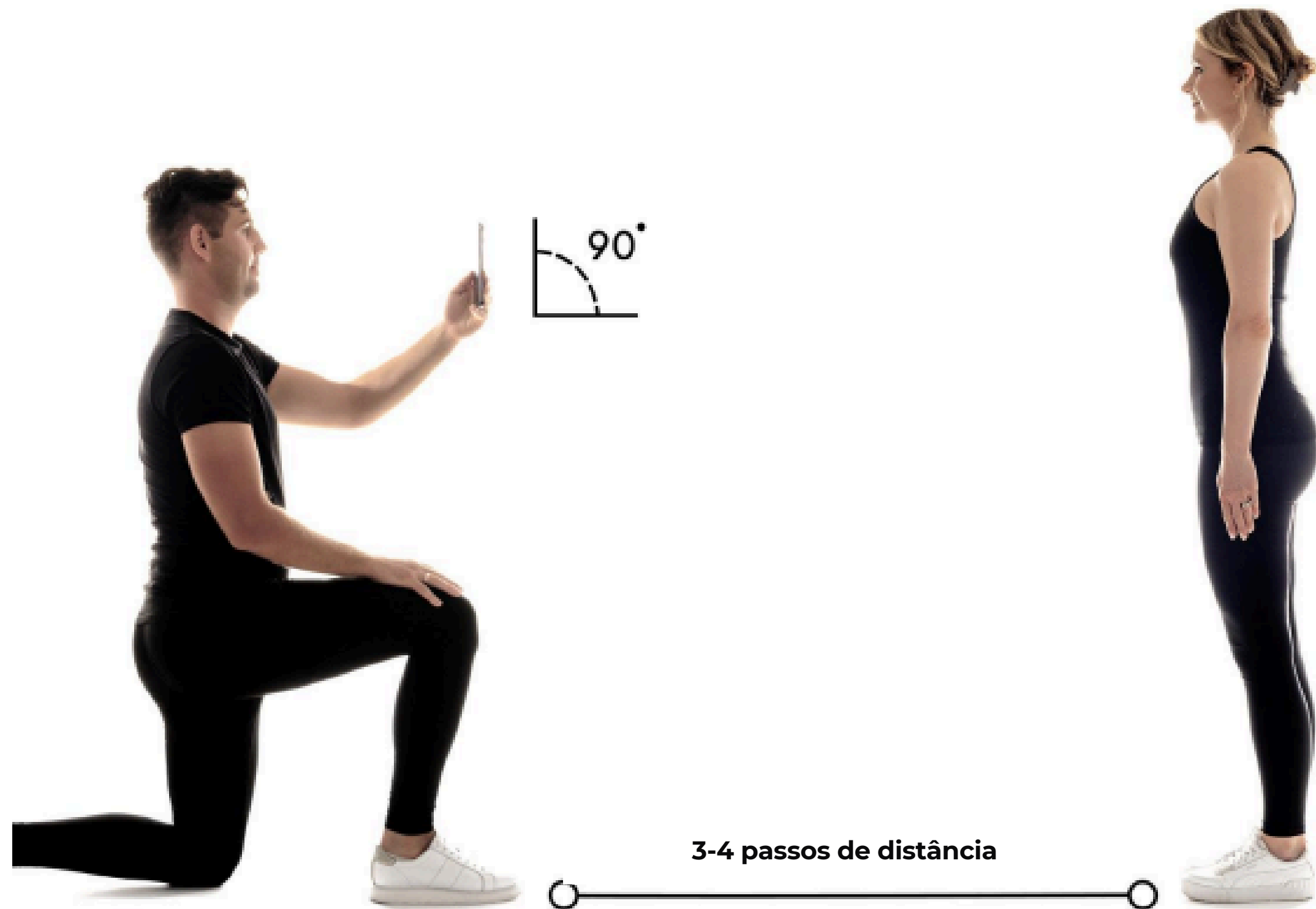


Fundo

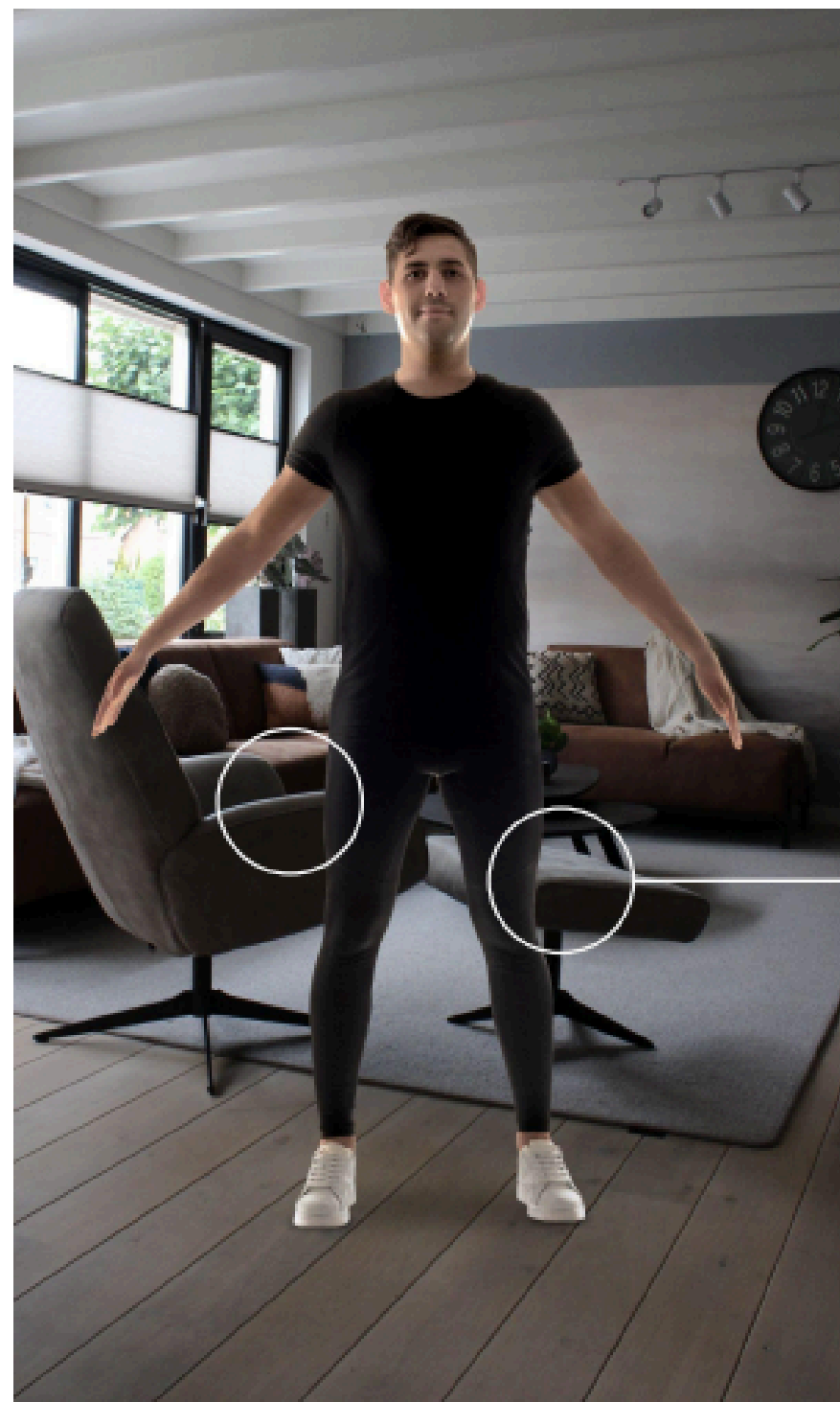

O fundo não deve estar desordenado – escolha um fundo limpo

Objetos da mesma cor no fundo podem confundir a detecção de forma corporal da nossa IA

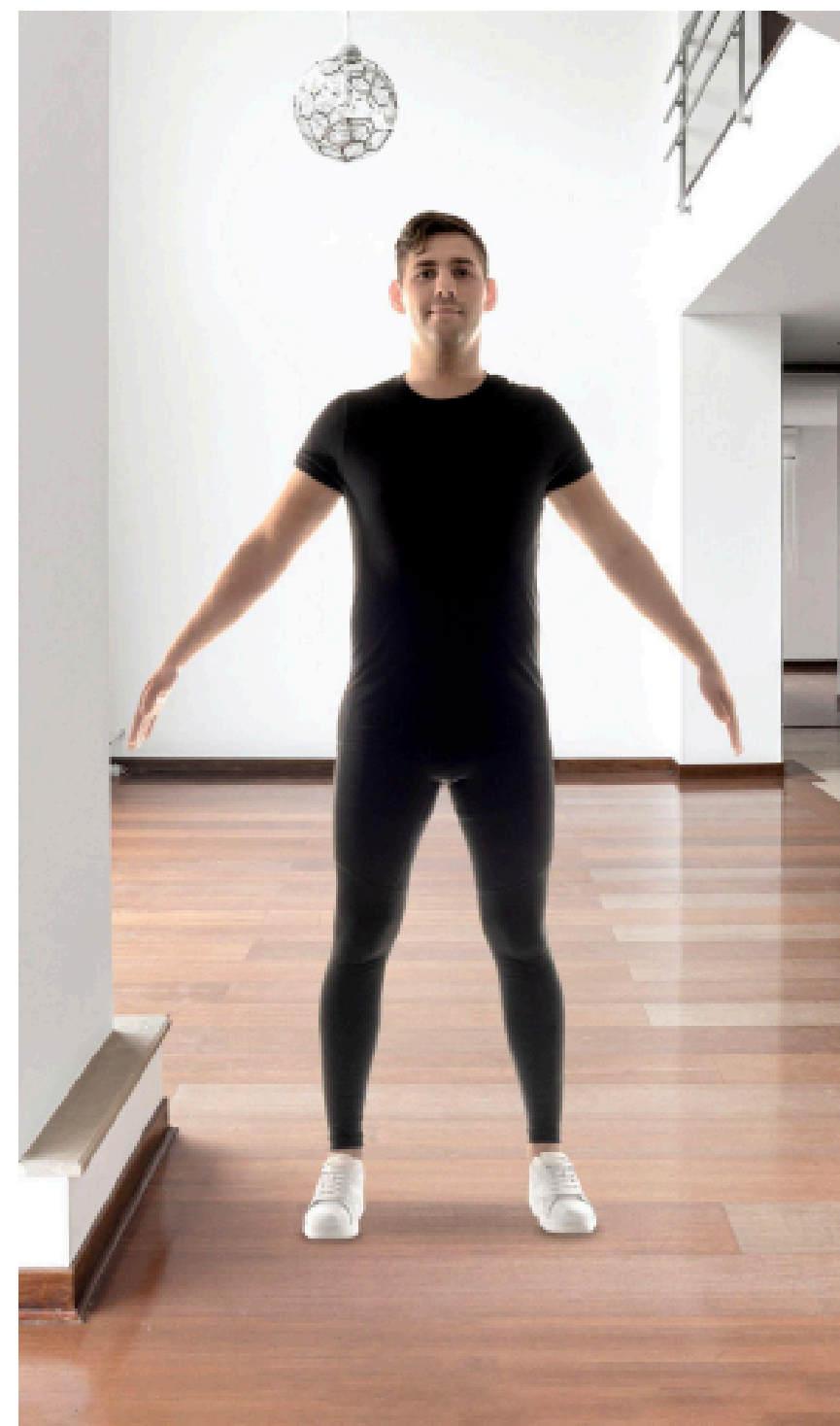

O fundo deve ser limpo e contrastar com o corpo e roupas do seu cliente,




Certifique-se de estar em um ambiente bem iluminado.

Como posicionar o celular no medidor

Mantenha o seu celular na posição vertical, sem incliná-lo para cima ou para baixo. As setas brancas devem estar dentro da faixa verde.




A posição está correta: o celular está alinhado, e as setas brancas estão dentro da faixa verde

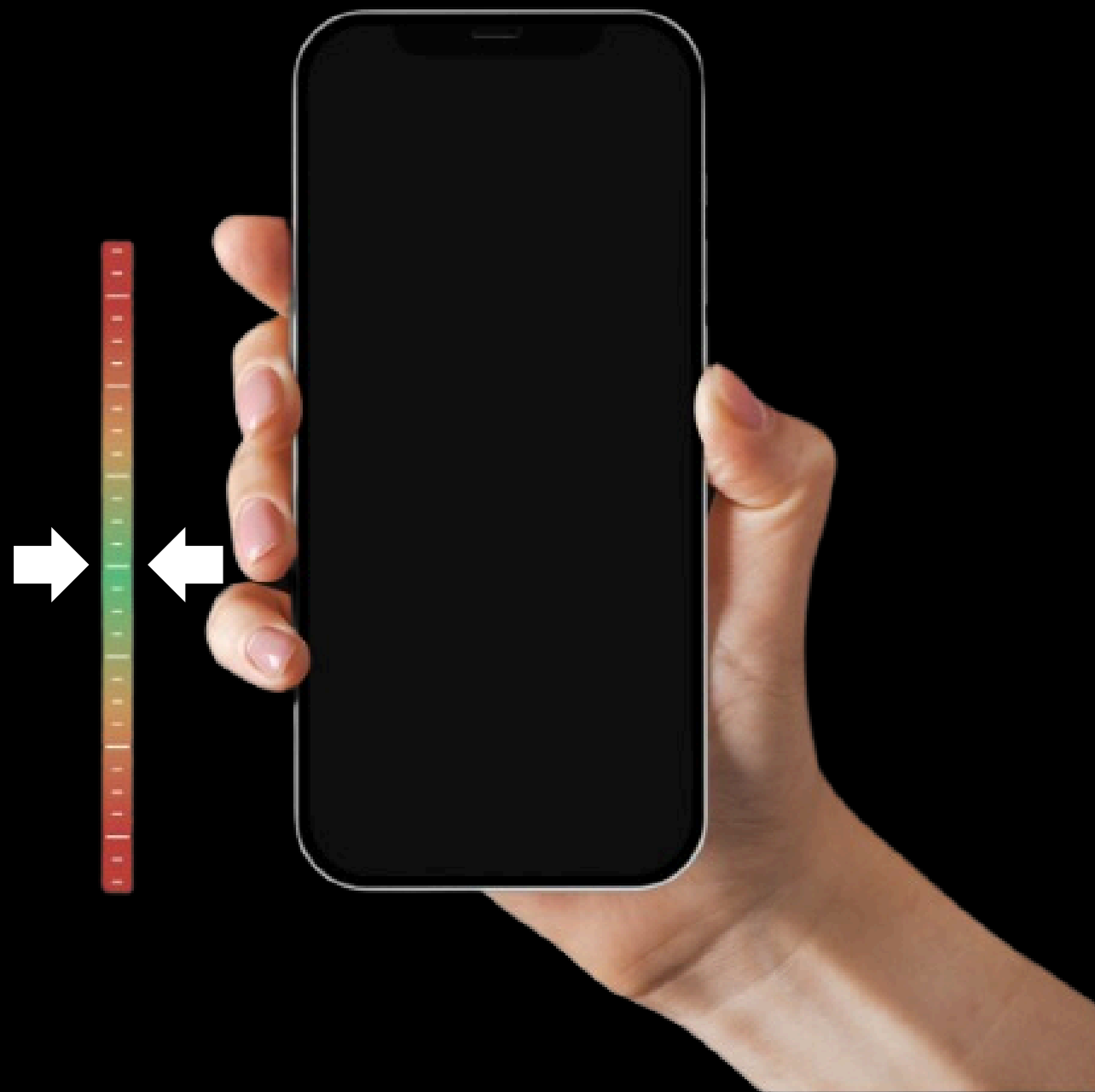

A posição está incorreta: as setas brancas estão fora da faixa verde



Como seu cliente deve se posicionar

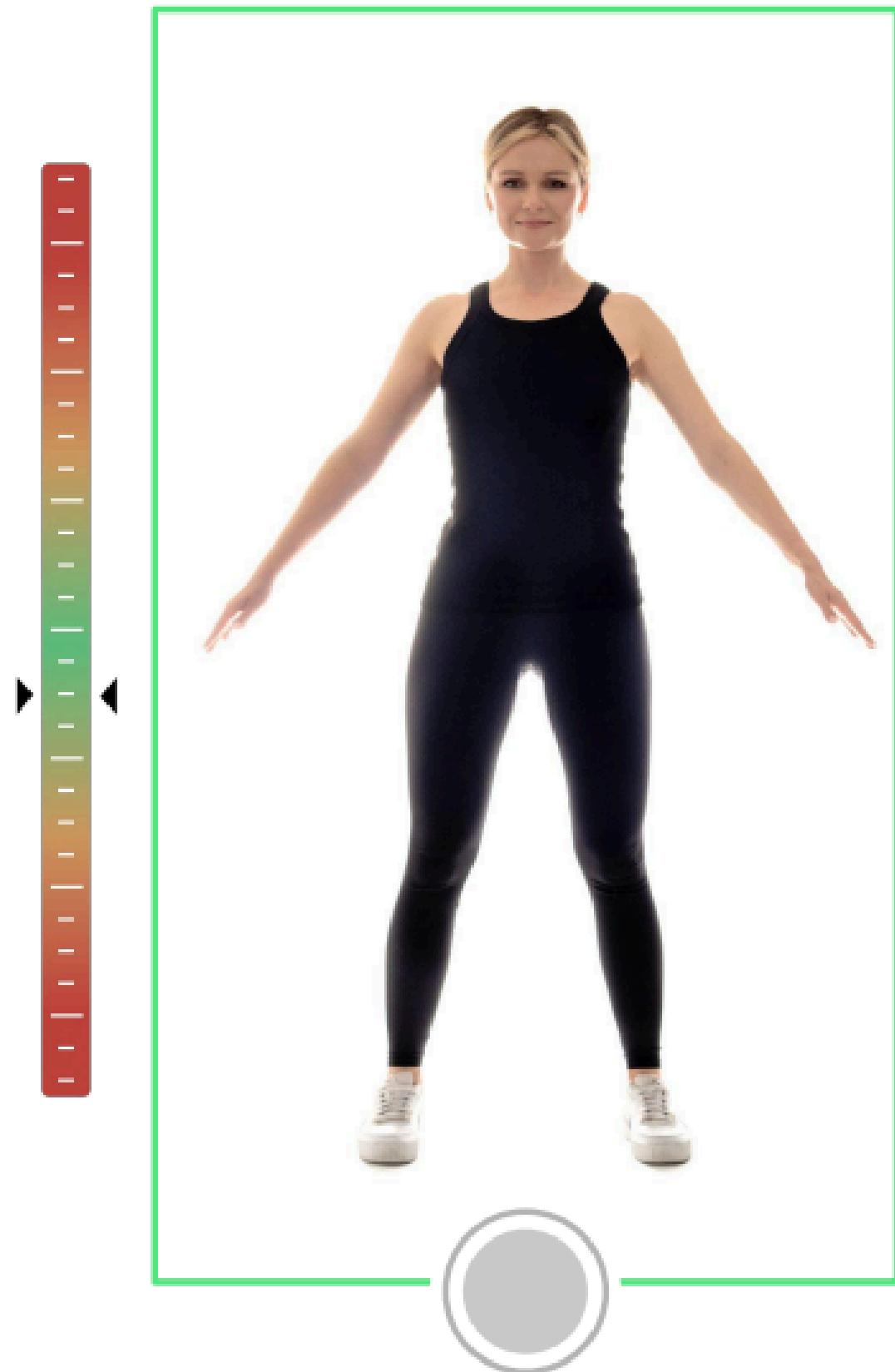

O seu cliente deve manter as mãos e os pés dentro do enquadramento



O corpo deve ocupar **70%** do enquadramento



Como seu cliente deve se posicionar

Foto frontal

Em pé, com a postura ereta, de frente para a câmera ✓

Afastar os braços dos quadris, formando um 'A' ✓

Manter os pés afastados um do outro ✓



Como seu cliente deve se posicionar

Foto lateral

Virar para a esquerda na mesma posição, mantendo a postura ereta ✓


Alinhar os braços com a linha das calças ✓

Manter as pernas e os pés juntos ✓



É importante mostrar o contorno frontal e traseiro do corpo

Poses incorretas

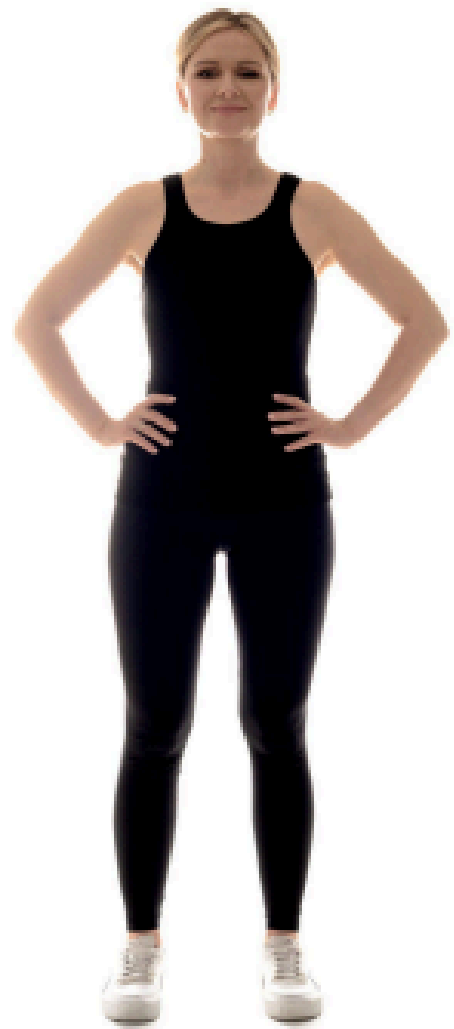


Os braços não devem estar apoiados nos quadris, cruzados atrás das costas ou acima da cabeça.



Os braços e as pernas não devem estar juntos



Fique em pé com a postura ereta. Não se incline ou curve para frente ou para trás

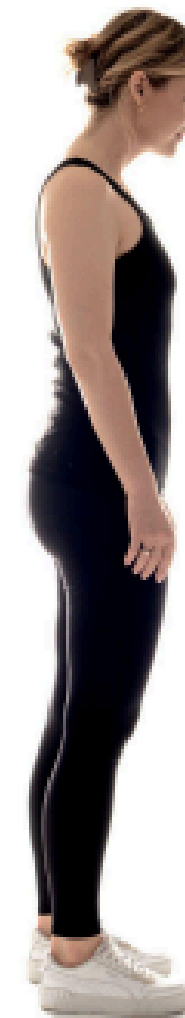

Não incline a cabeça




Os braços devem ser posicionados ao longo da linha das suas calças


Poses incorretas




✗ Os braços devem ser posicionados ao longo da linha das suas calças

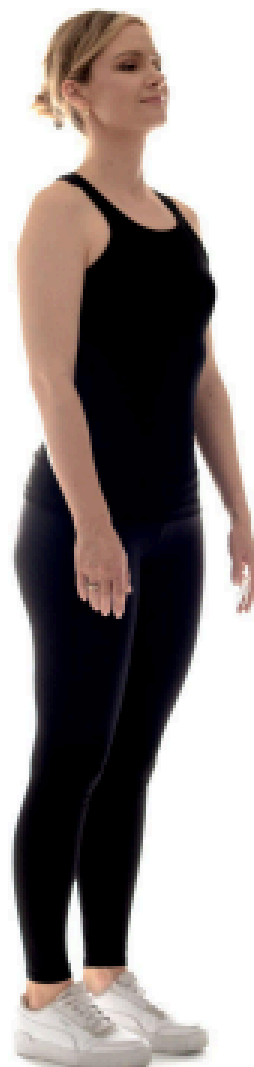

✗ Não incline o corpo

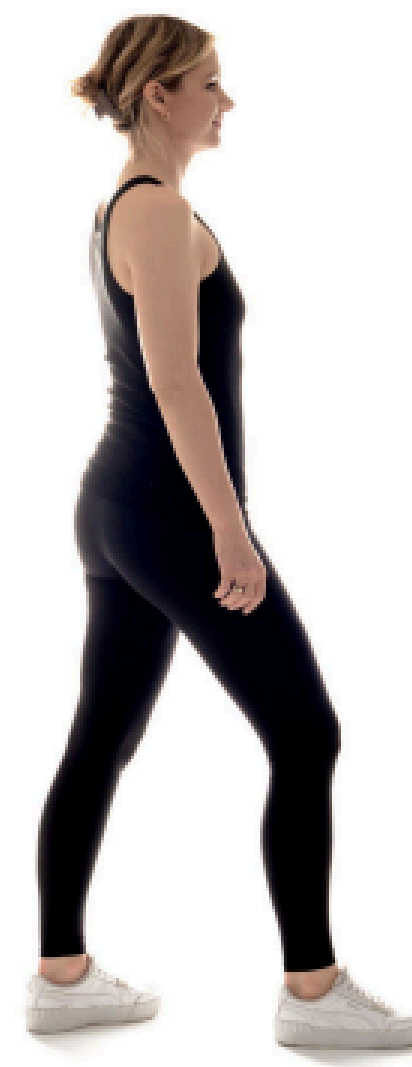

✗ As pernas e os pés devem estar juntos.

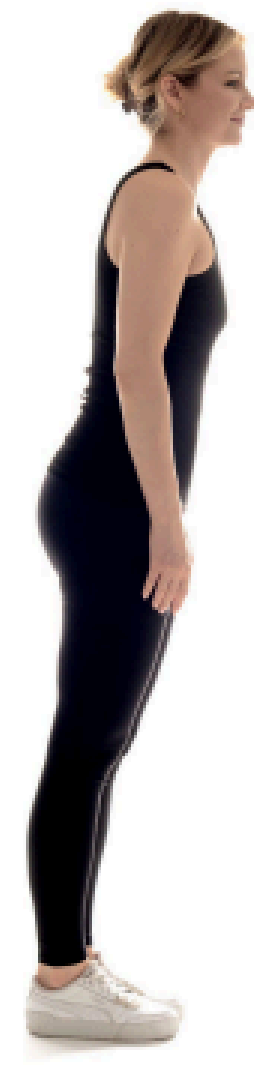

✗ Não se incline nem fique desleixado(a)

Digitalização vs. Fotos.


O Impacto da Adesão ao Protocolo na Consistência das Medições:

Roupas Largas e Estilo de Cabelo Incorreto

Precisão: Roupas largas escondem o formato real do corpo, levando a imprecisões nas medições.

Definição de Forma: Roupas justas garantem que nossa IA possa entender a definição do seu corpo para obter as medições mais precisas.

Cabelo: Cabelos longos ou soltos dificultam a detecção precisa das medidas da parte superior do corpo pela nossa IA.

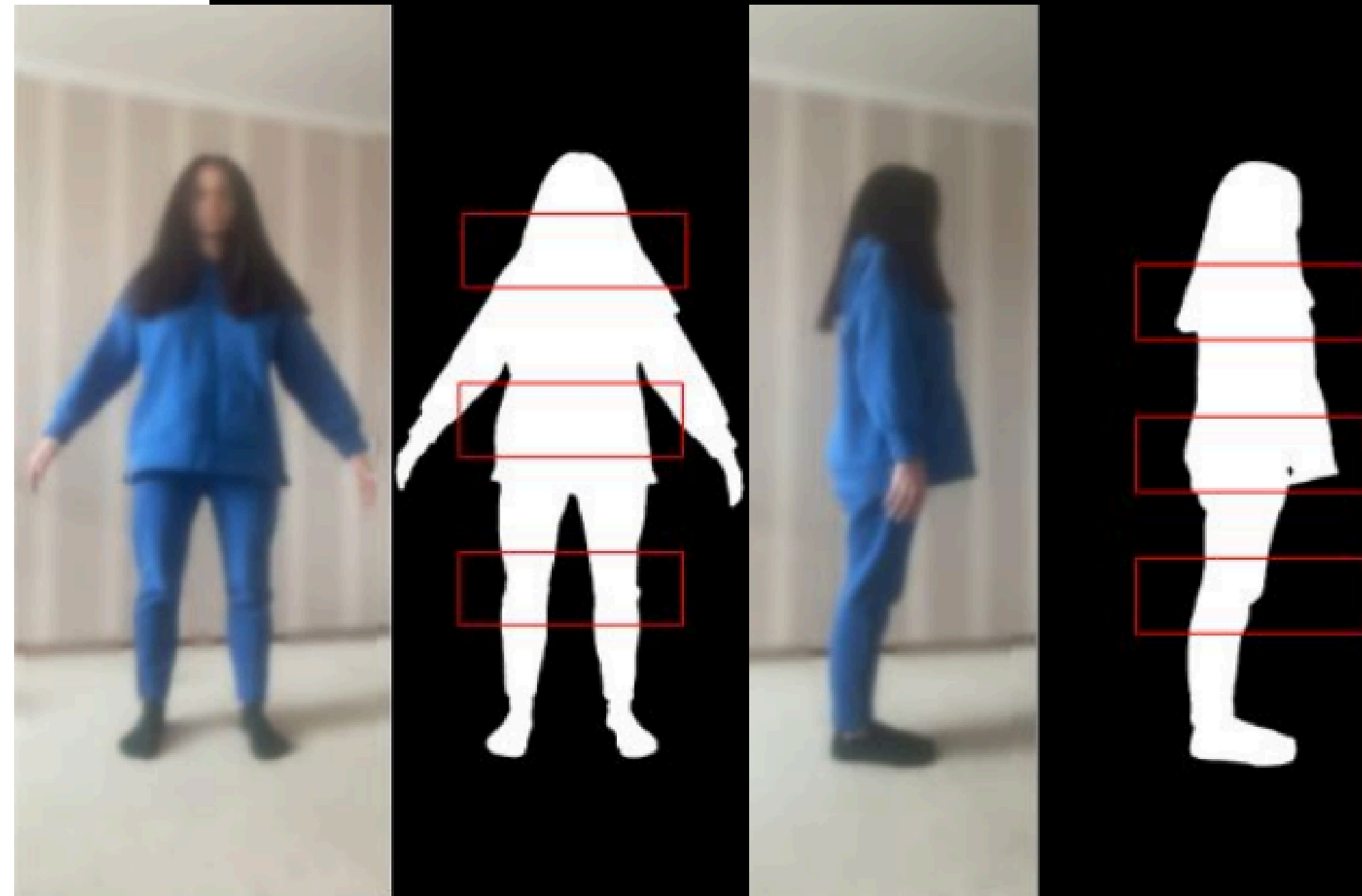


Digitalização vs. Fotos.

O Impacto da Adesão ao Protocolo na Consistência das Medições:

Saia / Vestido e Saltos

Saltos: Eles elevam a altura e alteram a postura, o que pode afetar a precisão na medição da estatura e da postura.

Saia/Vestido: Usar uma saia ou vestido oculta os contornos precisos da parte inferior do corpo, resultando em uma digitalização que não representa com precisão a forma real do corpo.

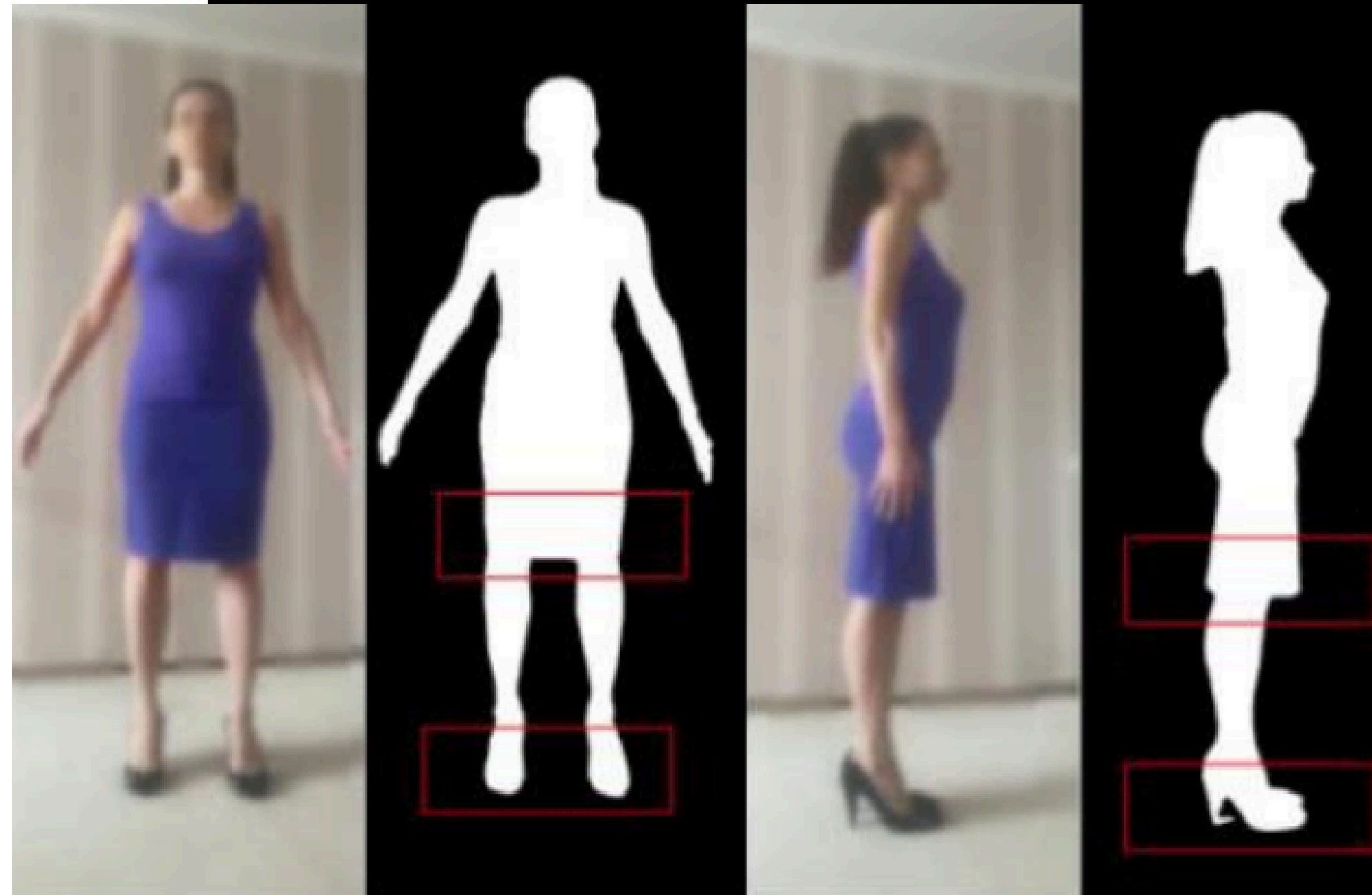


Digitalização vs. Fotos.

O Impacto da Adesão ao Protocolo na Consistência das Medições:

Pose incorreta

Quando os braços e as mãos estão muito próximos do corpo durante uma digitalização, podem ser confundidos com parte do tronco, levando a erros de medição. O posicionamento correto dos braços e das mãos, conforme as instruções, é essencial para resultados precisos.




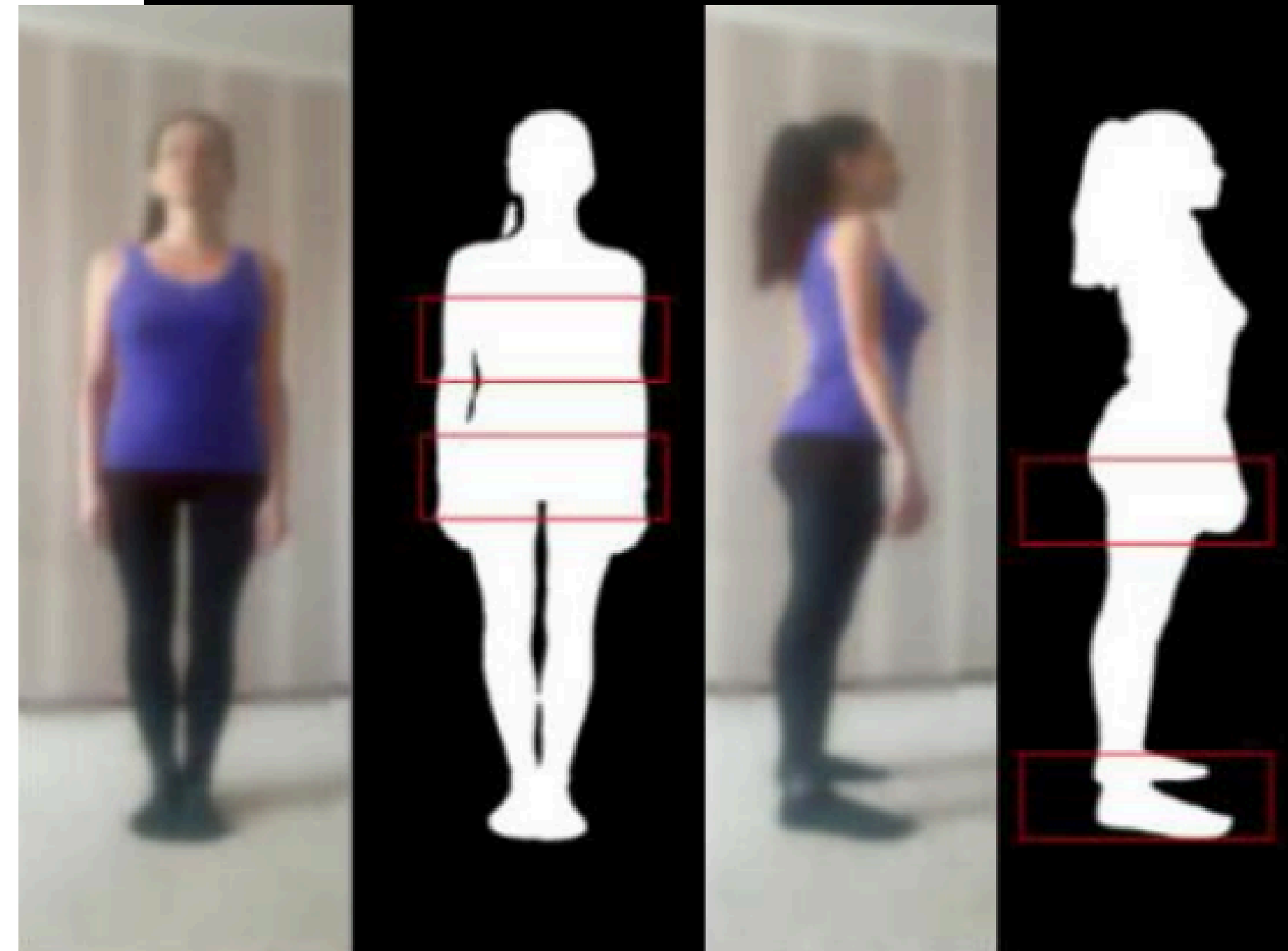


Digitalização vs. Fotos.

O Impacto da Adesão ao Protocolo na Consistência das Medições:


Fundo Incorreto e Posição dos Braços e Mãos para a Foto Frontal e Lateral

Para a pose frontal, os braços e as mãos devem estar afastados do corpo em uma pose de 'A', garantindo que não obstruam a visão do tronco. Na pose lateral, os braços e as mãos precisam estar alinhados com o corpo, permitindo que a IA visualize claramente tanto a parte frontal quanto a traseira do corpo, produzindo as medições mais precisas.

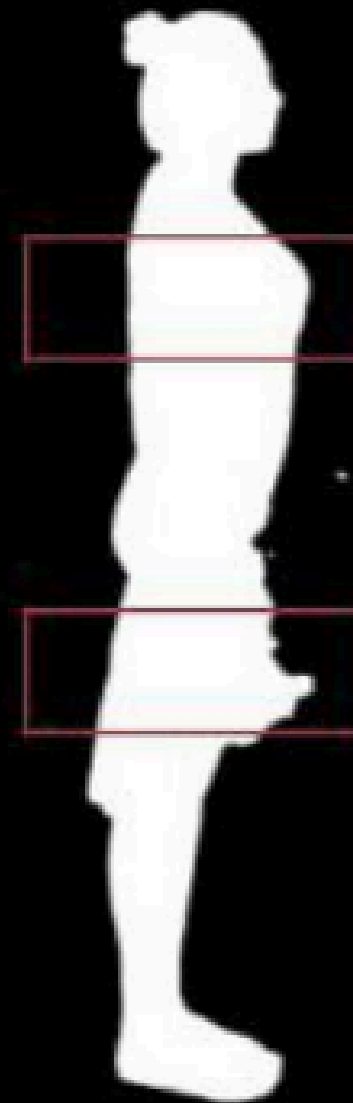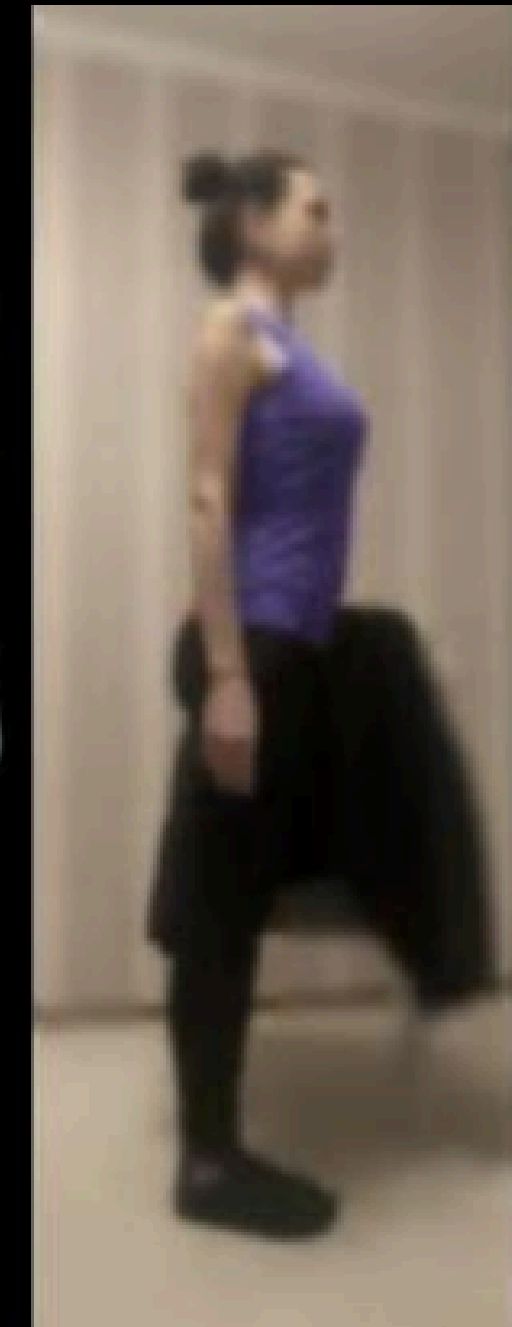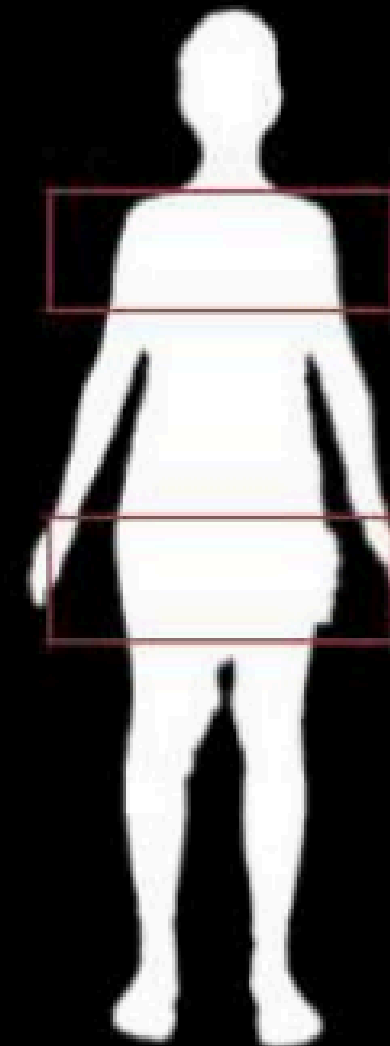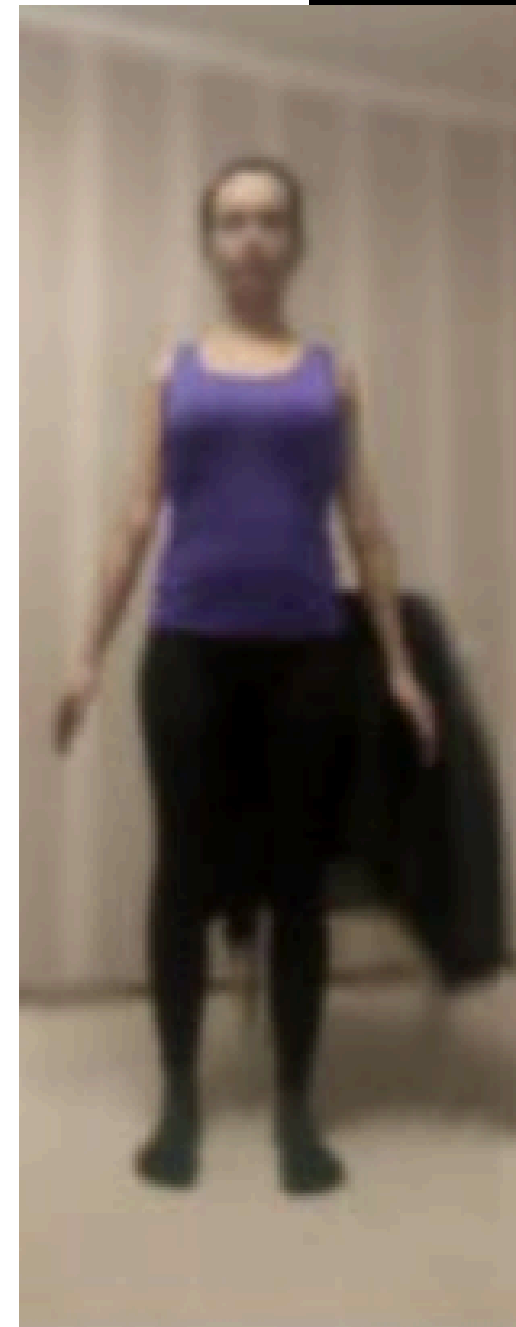

Digitalização vs. Fotos: O Impacto da Adesão ao Protocolo na Consistência das Medições:

Iluminação Insuficiente

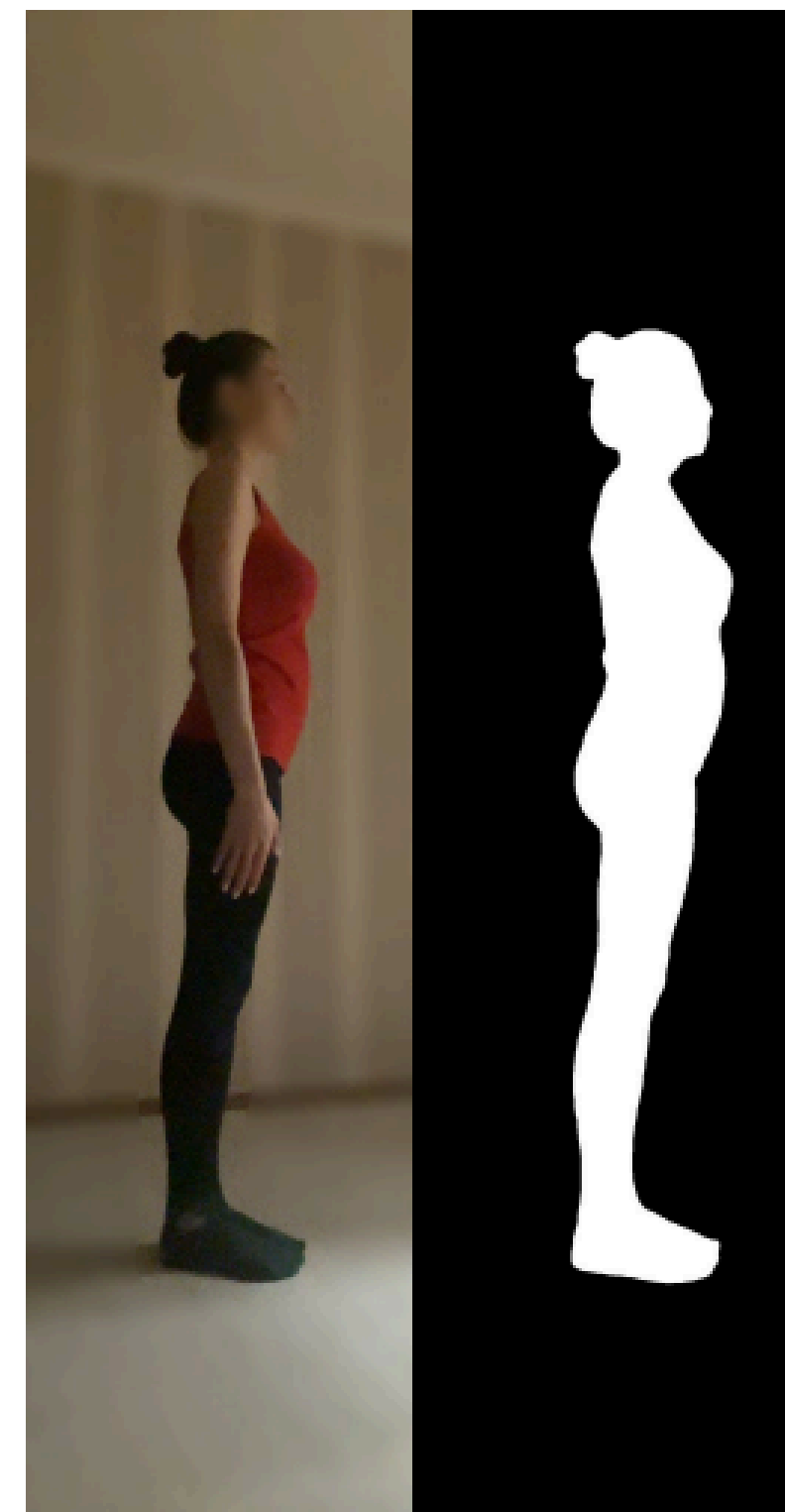



Os nossos métodos garantem medições precisas e consistentes em seus clientes, superando as técnicas manuais. Para manter esse alto desempenho, é fundamental que você siga todas as regras e instruções cuidadosamente

Obrigado por escolher a Tera Science.